

Cuticell® Contact®

Silikon Yara Temas Tabakası



Yüksek derecede Esnek
Atravmatik
Tek yönlü tutanan

Cuticell® Contact – etkileyici yara sakinleřtirici

Cuticell® Contact delikli řeffaf bir yapıya sahip ve oldukça uyumlu olan bir silikon yara temas tabakasıdır. Bu özellik, Cuticell® Contact'ı gelişmiş yara tedavisi için etkili bir primer yara pansuman malzemesi yapmaktadır.

Baştan beri yara dostu

Uygulandıktan sonra, Cuticell® Contact, yarayı koruyarak 14 güne kadar uygulandığı yerde kalabilir. Eksuda kolayca deliklerden geçebilir ve doku içi büyüme riski minimumdur. Tutunan taraf sadece yara temas yüzeyinde olduğu için ikincil sargılar yarada travmaya neden olmaksızın kolaylıkla değıştirilebilir.

- Rahatsız etmeyen iyileşme
- Ağrısız, atravmatik pansuman değışikliği
- Gelişmiş hasta uyumluluęu
- Maliyet-uygun



Etkileyici teknoloji – ayırt edici **güvenlik**

Şeffaflık

Cuticell® Contact'ın yüksek şeffaflığı, uygulamayı basitleştirir.

- Hassas uygulama
- Silikon örtüyü kaldırmadan kolay yara gözlenmesi

Optimal delikli yapı

Cuticell® Contact, cm2'de on adet delikli yapısıyla yüksek oranda viskoz eksüdanın bile kolayca geçebilmesini sağlar.

- Düşükden, çok fazla eksüda seviyesine kadar her yara için
- Maserasyonu önlemeye yardımcı olur

Eşsiz esneklik

İnce bir PU filminin ve tek taraflı bir silikon kaplamanın kombinasyonu Cuticell® Contact'ı son derece esnek ve uyumlu hale getirir.

- Kullanılması zor bölgeler için uygundur
- İkincil pansuman değişimi sırasında yerinde kalır

**Siltec
Technology**

painfree removal

Siltec Teknolojisi

Cuticell® Contact, Siltec Technology'den faydalanır. Silikon kaplı yarayla temas eden tarafı sadece kuru sağlıklı cilde yapışır, bu nedenle çok nazik bir tutunma sunar.


- Optimal cilt ve yara koruma
- Yara yatağına yapışmadan güvenli tutunma
- Doku-dostu ve acısız kaldırma
- kalıntı bırakmadan nazik kaldırma
- Hipoalerjik

Uygulaması kolay – benzersiz performans




Adım 1

Örtünün yapışkan yüzündeki koruyucu film tabakasını çıkartın

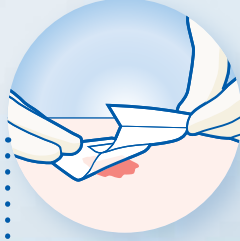

Adım 2

Yapışkan yüzü aşağı bakacak şekilde, Cuticell® Contact'ı uygulayın ve yaranın kenar boşluğunu 2 cm (3/4 inç) aşacak şekilde getirin

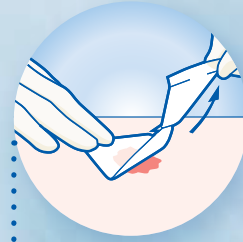

Step 3

Şimdi ikinci koruyucu filmi örtü yüzeyinden çıkarın ve elinizle yumuşak bir şekilde pürüzsüz hale getirin



Cuticell® Contact, drenaja ve ikincil fiksasyona dayalı ikincil bir pansuman ile birlikte kullanılabilir.

- Emici örtü
- Cutisorb® Alginate

Sabitlenme amacıyla aşağıdaki ürünler önerilir:

- Elastomull *
- Cover-Roll * / Cover-Roll * Stretch
- Fixomull * transparent

Cuticell® Contact – endikasyonlar

Silikon yara temas tabakaları aşağıdaki yara tipleri için uygundur:

- Kesikler
- Sıyrıklar
- Yanıklar
- Kronik yaralar
(baskı altında bile)
- Kesiler
- Su toplamaları
- Cilt lezyonları
- Aynı zamanda cilt koruma için de uygundur
(örn: radyasyon tedavisinden sonra)
- Antiseptiklerle birlikte kullanılabilir
- Çok hassas ve kırılğan ciltler için uygundur

Bütün avantajları

Cuticell® Contact, kullanıcılara ve hastalara çok sayıda fayda sağlıyor:

- Uzun ömürlü ve uygun maliyetlidir
- Atravmatik pansuman değişimi
- Eldivenlere yapışmaz
- Eksuda ile tıkanmaz
- Minimize edilmiş maserasyon riski
- Yarayı kolay gözlemlene
- Esnek ve uyumlu
- Kolay uygulama



Cuticell® Contact®

Cuticell® Contact, aşağıdaki yara koşulları için endikedir

Yara derinliği



Sığ

Eksuda düzeyi



Hafif düzeyden orta düzeye



Orta düzeyden yükseğe



Yüksek düzeyden çok fazlaya

Yara aşaması



Fibrin kaplama



Granülasyon



Epitelizasyon



Sipariş Bilgileri :

REF No.	Ölçü	Örtü/Kutu	Kutu/Sevkiyat	HCPSC*
7268000	2in x 3in (5 cm x 7.5 cm)	5	30	A6206
7268001	3in x 4in (7.5cm x 10 cm)	5	20	A6206
7268002	4in x 7in (10 cm x 18 cm)	5	20	A6207
7268003	6in x 10in (15 cm x 25 cm)	5	10	A6208

Bu ürünlerin güvenli kullanımı ile ilgili tüm talimatlar için lütfen ürün etiketine ve / veya paket içeriğine bakın.

* Bu belge, BSN tıbbi ürünler ve ilgili hizmetleri fatura etmek için kullanılabilecek kodları içerir. Sunulan hizmetlerin uygun kodlarını, ücretlerini ve değiştiricileri belirlemek ve sunmak yalnızca tedarik edicinin sorumluluğudur BSN medical Inc. kapsama ve geri ödemeyi garanti edemez

BSN medical Inc. 5825 Carnegie Blvd. Charlotte, NC 28209-4633
Tel. (+1) 704 554 9933 Fax (+1) 704 358 4558 www.bsnmedical.com
To order toll-free: BSN medical (+1) 800 552 1157

